

CEFALY®




CEFALY Enhanced Kurzanleitung


Willkommen in der CEFALY-Community! Nutzen Sie diese Kurzanleitung als Leitfaden für Ihre erste Behandlungssitzung, aber denken Sie daran, dass es sich dabei nur um die wichtigsten Punkte handelt.

Lesen Sie vor Ihrer ersten Behandlung unbedingt auch die vollständige Gebrauchsanweisung.


Das Wichtigste zuerst

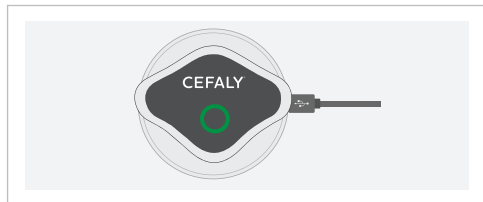



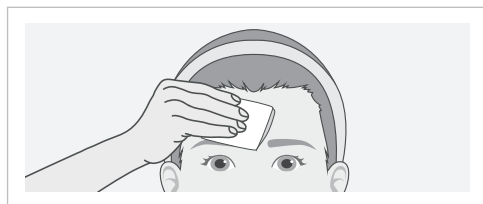



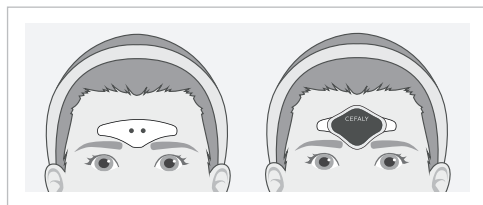


1. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bis die Kontrollleuchte grün leuchtet (gelb = schwache Batterie)



2. Waschen und trocknen Sie die Stirn knapp über den Augenbrauen



3. Elektrode positionieren und Gerät anbringen


	AKUTE Behandlung	PRÄVENTIVE Behandlung
Beginn Ihrer Behandlung Wählen und bestätigen Sie einen Behandlungsplan wie folgt:		
 Anwendung	Anwendung bei den ersten Anzeichen eines Migräneanfalls	Tägliche Anwendung zur Vorbeugung künftiger Migräneanfälle
 Die Behandlung starten	Taste 1X antippen	Taste 2X antippen (mit einer kleinen Pause zwischen jedem Drücken)
 Was Sie hören werden	 1 Piepton	 2 Pieptöne
 Was Sie sehen werden	 Eine LED-Anzeige blinkt in einem türkisen Farbton	 Zwei LED-Anzeigen blinken in violetten Farbtönen
 Behandlungszeit	60 Minuten	20 Minuten



Finde deinen optimalen Bereich

Während der Behandlung können Sie ein kribbelndes Gefühl verspüren. Dies wird durch winzige elektrische Impulse verursacht, die den Trigemiusnerv stimulieren sollen. Die Benutzung Ihres CEFALY-Geräts sollte niemals schmerzhaft sein.

Wenn Sie CEFALY zum ersten Mal benutzen, sollten Sie das Gerät auf der höchsten Intensitätsstufe verwenden, die für Sie angenehm ist. Sie müssen nicht mit maximaler Intensität arbeiten und können die Intensität bei späteren Sitzungen erhöhen, wenn Sie sich dazu bereit fühlen.

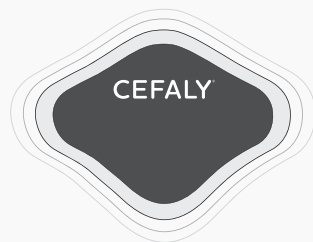


Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihre bevorzugte Intensitätsstufe einzustellen:

Bei beiden Programmen wird die Intensität allmählich gesteigert, bevor sie nach 14 Minuten die volle Intensität erreicht.

Pflege der Elektroden

Die richtige Pflege Ihrer CEFALY-Elektroden erhöht die Anzahl der Behandlungen, die mit ihnen durchgeführt werden können. Befolgen Sie diese Richtlinien:


- Da unsere Finger natürliche Öle haben, die die Wirksamkeit des Gelpads verringern, empfehlen wir, die Elektrodenpads am Rand zu halten.

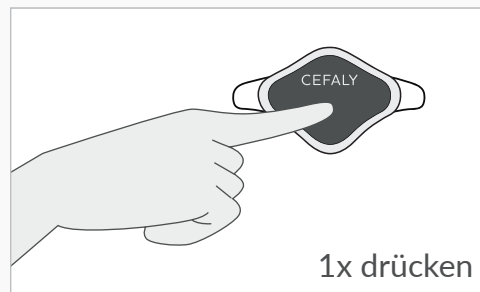


Wenn die Intensität in den ersten 14 Minuten einer der beiden Behandlungen zunimmt, drücken Sie die Gerätetaste 1 Mal, um die Intensität für den Rest der Sitzung zu speichern.

- Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Stirn vor jeder Behandlung gründlich waschen und abtrocknen. Verwenden Sie einfache Seife und vermeiden Sie alkoholhaltige Tücher und Gesichtereiniger.

- Während der aktiven Behandlung sollten Sie übermäßige Bewegungen möglichst vermeiden.
- Wenn Sie eine Elektrode nach einer Behandlung entfernen, legen Sie sie sofort mit der Klebeseite nach unten wieder auf die Kunststoffunterlage. Dann verschließen Sie sie in dem Elektrodenbeutel.

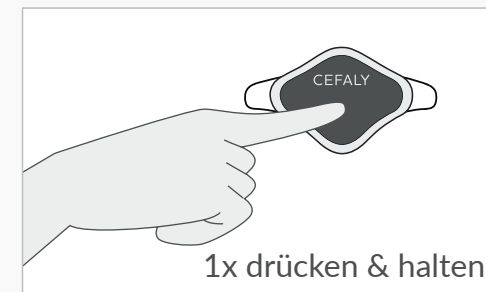

Um die Intensität während der ersten 14 Minuten schneller zu steigern, halten Sie die Taste gedrückt. Dies ist eher für erfahrene CEFALY-Nutzer geeignet.

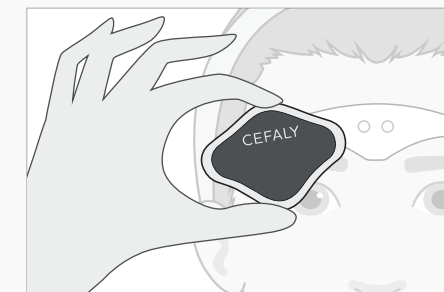

Um die Behandlung vorzeitig zu beenden, ziehen Sie das Gerät einfach von der Elektrode ab.

Weitere Informationen

Das CEFALY Enhanced Benutzerhandbuch liegt Ihrem Gerät bei

Startseite:
cefaly.com/start

Kundenservice:
cefaly.com/contact-us

Ref: 28027 V02

CEFALY[®]